



Avanteen harjoituspakkaus


Tämän pakkauksen avulla voit harjoitella avannesidoksen kiinnittämistä ja saada tuntumaa sen käyttöön jo ennen varsinaista toimenpidettä.

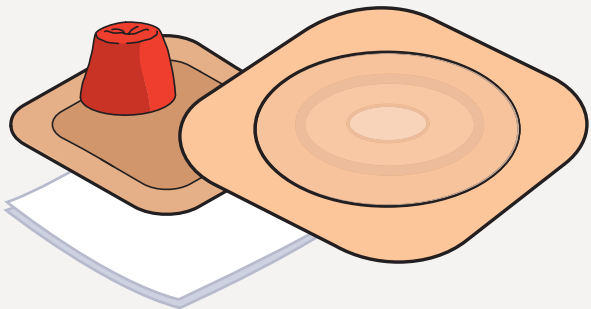


- 1 Irrota suojakalvo harjoitteluun tarkoitetusta ihonsuojalevystä ja kiinnitä levy vatsan iholle avannehoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen neuvomaan kohtaan.

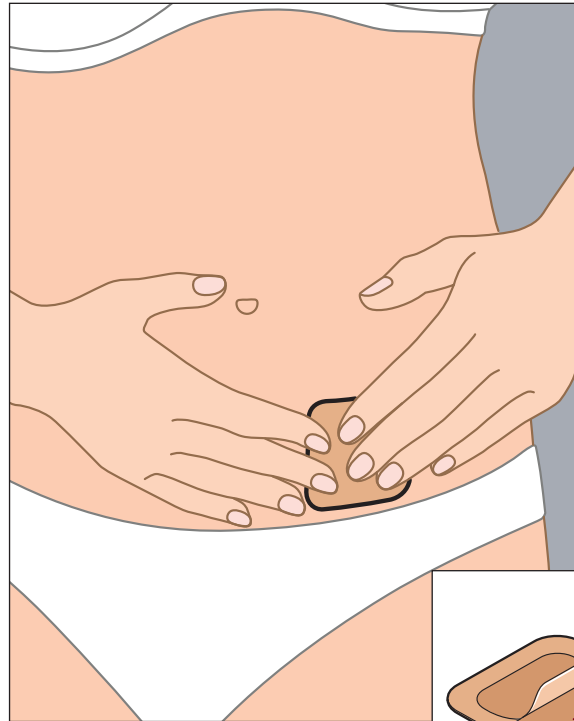

- 2 Irrota suojakalvo malliavanteesta ja kiinnitä se aiemmin iholle kiinnittämäsi harjoitteluun tarkoitettuun ihonsuojalevyyn.

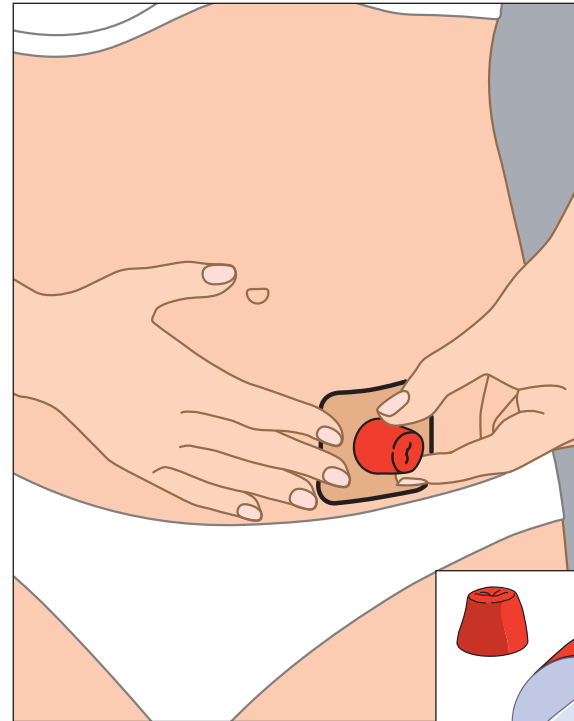

- 3 Irrota suojakalvo ihonsuojalevystä. Kohdista ihonsuojalevyn aukko malliavanteen kanssa ja paina ihonsuojalevy varovasti kiinni harjoitteluun tarkoitettuun ihonsuojalevyyn ja ihoon. Pyydä tarvittaessa neuvoa avannehoitajalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta.

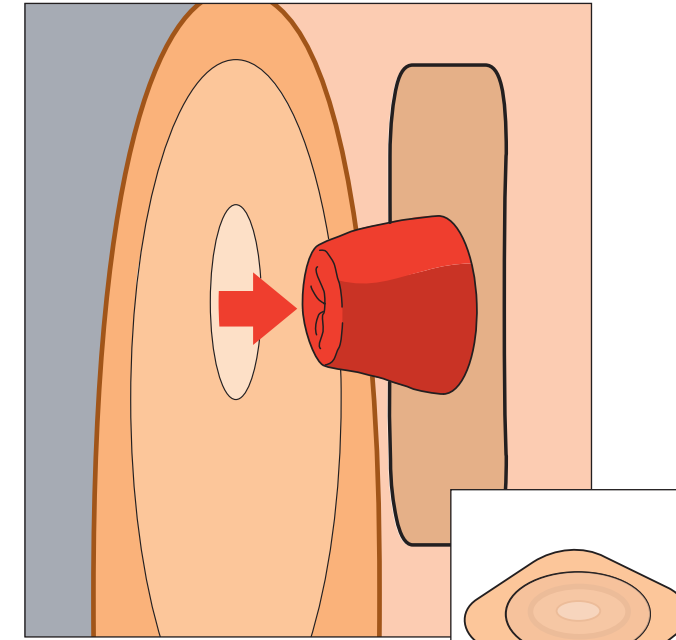

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.
Metsäläntie 20, 00320 Helsinki
Asiakaspalvelu puh. 010 841 3040
info.fi@hollister.com
www.hollister.fi

Hollister, Hollisterin logo ja "Healthy skin, positive outcomes." ovat Hollister Incorporatedin tavaramerkkejä.
© 2022 Hollister Incorporated
www.hollister.com

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA


EC REP
Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

 Hollister®

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.


4

Jos käytät kaksiosaista avannesidosta, kiinnitä avannepussi ihonsuojalevyyn.

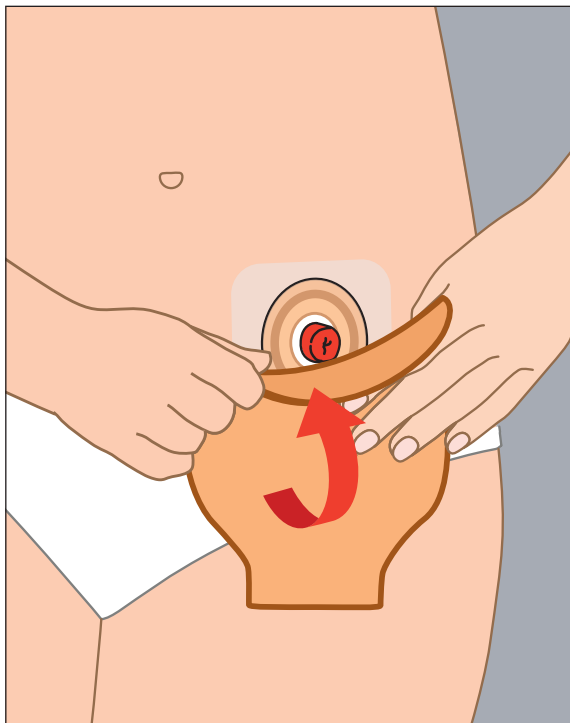


5

Kun haluat irrottaa harjoitteluun tarkoitetun ihonsuojalevyn ja avannepussin hävittämistä varten, ota kiinni avannepussin ihonsuojalevyn yläreunasta ja vedä levy varovasti irti ihosta. Vedä ihonsuojalevyä varovasti alaspäin, kunnes saat sen kokonaan irti. Harjoitteluun tarkoitettu ihonsuojalevy ja malliavanne irtoavat todennäköisesti samalla.

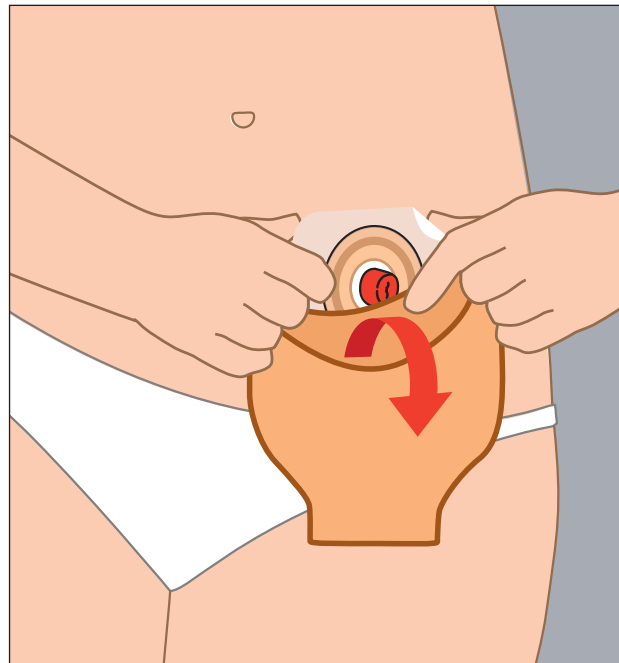

Valinnainen vaihe: voit halutessasi käyttää ihonsuojalevyn ja harjoitteluun tarkoitetun ihonsuojalevyn irrottamisen yhteydessä pakkaukseen sisältyvää kiinnitysaineen poistopyyhettä. Tutustu kiinnitysaineen poistopyyhkeiden mukana tuleviin käyttöohjeisiin.

Noudata kaikkia paikallisia hävittämistä koskevia määräyksiä.

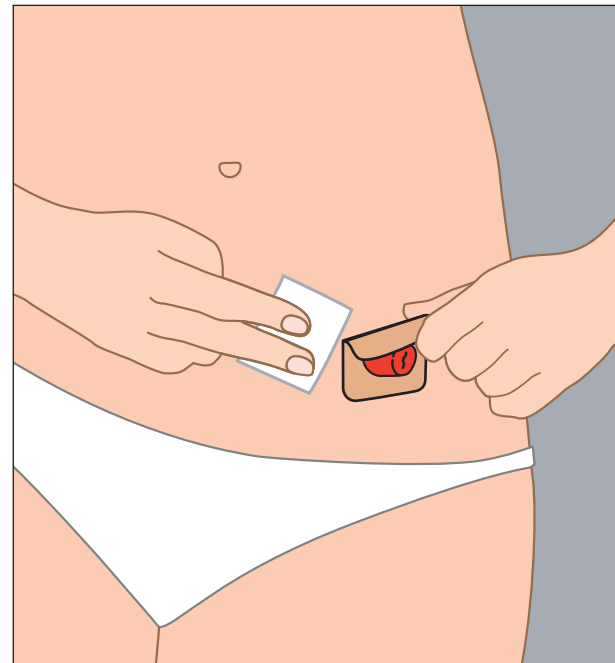

Avannepussin käytön harjoittelupakkauksen sisältö

- 2 ihonsuojalevyä harjoitteluun varten
- 2 malliavannetta
- avannesidos (voi sisältyä pakkaukseen tai voit saada sen avannehoitajalta)
- 2 kiinnitysaineen poistopyyhettä

Tuotekuvaus

Ihonsuojalevy harjoittelua varten, malliavanne ja avannesidos (ks. pakkauksen sisältö) on tarkoitus irrottaa ja hävittää harjoittelun jälkeen. Harjoitteluun tarkoitettu ihonsuojalevy ja avannepussin ihonsuojalevy on valmistettu ihoon kiinnittyvästä hydrokolloidimateriaalista, polymeeri-/kopolymeerimuovista ja kuitukankaasta. Malliavanne on valmistettu polyuretaanista (PU). Ei sisällä luonnonkumilateksia.

Käyttöaiheet ja käyttötarkoitus

Tämän pakkauksen avulla voit harjoitella avannesidoksen kiinnittämistä ja saada tuntumaa sen käyttöön jo ennen varsinaista toimenpidettä.

Varoitukset

Kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa tuotteen huonon tarttuvuuden iholle.


Varotoimet

Käytettävä ohjeiden mukaan. Lopeta käyttö, jos ärsytystä ilmenee. Jos malliavanne kiinnitetään suoraan ihoon, seurauksena voi olla ihovaurioita (esim. ärsytys, rikkoutunut iho, ihottuma tai punoitus).

Huomaa:

Asianmukaisen tarttuvuuden varmistamiseksi aseta harjoitteluun tarkoitettu ihonsuojalevy puhtaalle, kuivalle ja ehjälle iholle. Älä käytä öljyjä tai voiteita. Nämä tuotteet saattavat häiritä ihonsuojalevyn tarttumista. Ota yhteyttä avannehoitajaan tai terveydenhuollon ammattihenkilökuntaan, jos tarvitset apua avannesidoksen tai ihoärsytyksen kanssa.

Mikäli tuotteen käyttöön liittyy ilmenee vakava loukkaantuminen (tai muu vakava tapahtuma), ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekä paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen (www.hollister.com/authority).

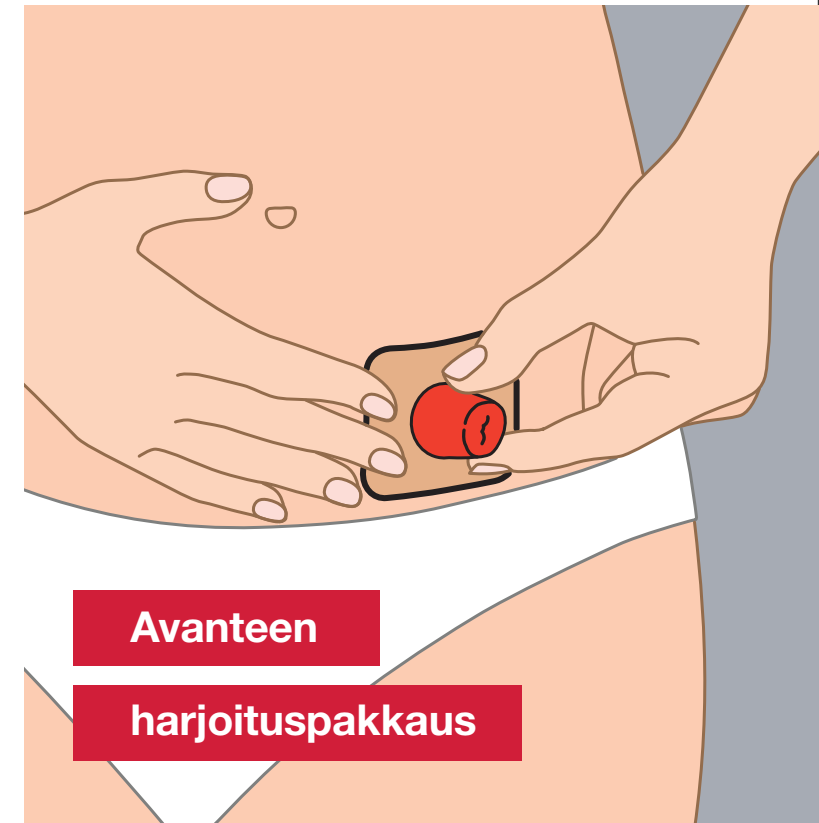

Avanteen

harjoituspakkaus



Hollister

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.